



## **Instrucciones de uso**

El gel DentaKote es un tratamiento profiláctico súper hidrofóbico para usar en dispositivos médicos y prótesis dentales donde las biopelículas pueden colonizar. También existe su uso en la dentición natural.

El gel es un biopolímero autoadhesivo, permeable a los gases y estable al PH que cumple con las especificaciones del FDA para su uso en aplicaciones intraorales. Es duradero y biocompatible cuando se usa según lo previsto. Sus propiedades únicas reducen significativamente la adhesión de las bio películas bacterianas, lo que reduce la oportunidad de colonización.

El polímero incoloro, sin olor e insípido se puede aplicar y esparcir hasta una micra de espesor. Inmediatamente después de la aplicación, Dentakote exhibe dos propiedades... un lado de unión tenue y un lado no adhesivo.

La duración típica en cualquier prótesis o dientes naturales es de seis meses a un año. Después de eso, se recomienda repetir la aplicación cuando posible.

La aplicación del gel DentaKote es simple y directo. Con el cepillo precargado, limpie todas las superficies expuestas (externas e internas) de cualquier aparato... dentadura postiza, híbrida, parcial, aparato ortodóncico, acrílico, metal, PMMA, zirconia, implante o dientes naturales. No requiere curado. Se auto adhiere a través de un enlace covalente y debe tener solo una micra de espesor

cuando se completa la aplicación. No se recomienda una capa más gruesa. Es importante de una vez aplicado, usar una gaza y tratar de limpiarlo para que se quede una película delgada.

Es especialmente importante recubrir la superficie hacia los tejidos blandos de los casos de implantes fijos, ya que una vez atornillados en su lugar, se vuelve muy difícil, si no imposible, de limpiar debido al contorno de las superficies de los tejidos.

La superficie excepcionalmente no adhesiva de DentaKote impide la adherencia de las partículas de alimentos y el posterior desarrollo de una biopelícula. Con la aplicación del gel DentaKote, las bacterias y las partículas de alimentos se eliminarán más fácilmente. Por lo tanto, creando un estado protésico más saludable.

DentaKote es un producto de marca registrada que es seguro y eficaz para usar en dientes, implantes dentales o todos los dispositivos protésicos dentales.

Use el aplicador precargado solo en un paciente y deséchelo adecuadamente después de usarlo

Solo para uso profesional.

Para más información o asistencia;

[www.DentaKote.com](http://www.DentaKote.com)

[info@DentaKote.com](mailto:info@DentaKote.com)